

LIQUID BLOCKER (PAP PEN)

BIOGNOST®

IVD *In vitro* diagnosztikus orvostechnikai eszköz **CE**

Pap Pen szövettani metszet körüli víztaszító kör készítésére

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

REF Katalógus szám: ML-1 (1 db)

Bevezetés

A Liquid Blocker (Pap Pen) innovatív előnyökkel rendelkezik, különösen hatékonyan használható:

- immunhisztokémiai használhatósága széleskörű (PAP módszerhez, ABC módszerhez is)
- 120 °C-ig hőrezisztens
- megkönnyíti az immunhisztokémiai technikát
- közvetlenül a nedves tárgylemezen használható
- használatával szükségtelenné válik a tárgylemezek metszet körüli állandó körbetörlése, szárítása
- jól és tartósan tapad a tárgylemezhez

Termék leírása

- **LIQUID BLOCKER (PAP PEN)** – hidrofób folyadékkal töltött toll, amely víztaszító barriert képez a szövettani metszet körül.

Használat

A Liquid Blocker (Pap Pen) egy víztaszító réteget képez, amely segítségével szükségtelenné válik a szövettani metszet körbetörlése az immunhisztokémiai festés egyes lépései között. Mivel a festés során az antitestet is védi a Liquid Blocker karika, így biztosított a legjobb hatásokkal működése. A Liquid Blockerrel felületre felvitt kör xilollal eltávolítható. A víz bázisú fedőanyagok nem oldják, így nem zavarja a mikroszkópos kiértékelést sem. Mikrohullámú sütőben, in situ hybridizációhoz és egyéb technikákhoz egyaránt használható.

Megjegyzés:

- Használat előtt a tollheggyel felfelé tartva ujjbeggyével nyomja meg a hegyet, hogy eltávolítsa a tartályban található levegőt a túlfolyás elkerülése érdekében.
- Amennyiben a toll tartalma mégis túlfolya, törölje le a felesleges folyadékot egy kendő vagy papírtörülkö segítségével.
- Használat előtt enyhén nyomja meg a tollat heggyel lefelé tartva, hogy a folyadék átítassa a hegyet.

A minta elkészítése és diagnosztikája

A minta levételéhez és kezeléséhez csak erre alkalmas eszközöket használjon. A minták modern technológiával feldolgozandók és megbízhatóan jelölendők. Mindig kövesse a gyártó által biztosított használati útmutatót. A hibák elkerülése céljából a festési eljárásokat és a diagnosztikát mindig erre megfelelően képzett és felhatalmazott személy végezze. Az elemzést orvosi diagnosztikai laboratóriumi követelményeknek eleget tevő mikroszkóppal végezze. A helytelen végeredmény elkerülése érdekében mindig végezzen pozitív és negatív kontrollt használat előtt.

Munka- és környezetvédelem

A terméket a munkavédelmi és környezetvédelmi irányelveknek megfelelően használja. A használt vagy lejárt szavatossági idejű oldatokat a nemzeti ajánlásoknak megfelelően veszélyes anyagként kell kezelni és megsemmisíteni. Az ehhez a festési eljáráshoz alkalmazott reagensek veszélyesek lehetnek az emberi egészségre. A folyamat során vizsgált minták fertőzésveszélyt jelenthetnek. Az emberi egészség megóvása érdekében a jó laboratóriumi gyakorlatnak megfelelő ajánlott védő intézkedések betartása javasolt. A termékek a rajtuk található figyelmeztető jelzéseknek, valamint a BioGnost termékbiztonsági adatlapjaiban leírtaknak megfelelően kezelendők.

Tárolás, stabilitás és lejárati idő

A Liquid Blocker (Pap Pen) +15°C és +25°C között tárolandó. Nem tárolható hideg környezetben, nem fagyasztható és ne tegyük ki direkt napfénynek.

ML-1, EN1, 20 November 2019, IŠP/VR

	Lásd a mellékelt dokumentumon		Tárolási hőmérséklet		Tesztek száma csomagolásonként	REF	Termékkód	CE	Európai minősítés
	Lásd a mellékelt útmutatót		Hőtől és fénytől védve tárolandó		Minőségét megőrzi	LOT	Lot szám		Gyártó
IVD	In vitro diagnosztikai alkalmazásra		Száraz helyen tárolandó		Vigyázat, törékeny				

 BIOGNOST Ltd.
Medjugorska 59
10040 Zagreb
CROATIA
www.biognost.com **CE**