

HISTOLS[®]-BBPS (Background Blocking Protein Solution)

Háttér gátló fehérje oldat

Katalógus # 30012

ALKALMAZÁS

- **In Vitro:** Ez a termék kvalitatív immunhisztokémiai alkalmazásra javasolt ép és kóros, formalin-fixált, paraffinba ágyazott szövettani metszeteken, fénymikroszkópos értékelésre.
- **Leírás:** A BBPS oldat gátolja az elsődleges és másodlagos antitestek nem fajlagos kötődését azzal, hogy telíti a nem-specifikus kötőhelyeket. Formalinban fixált, paraffinba ágyazott szövetek immunhisztokémiai festéséhez használható háttérgátló reagens.

TERMÉK TARTALMA

- **HISTOLS[®]-BBPS**
20 ml, fehérje tartalmú, használatra kész oldat.

MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOT

- **Sterilitás:** A termék nem steril.

MÓDSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK

- A háttérgátlást közvetlenül az elsődleges antitest alkalmazása előtt kell végezni.
- Inkubálja a metszeteket ezzel az oldattal, hogy csökkentse a háttér festődését és a nem specifikus kötések kialakulását.
- A metszetek előkezelése és az elsődleges antitest inkubációja az antitest gyártójának ajánlása szerint történik.

HASZNÁLAT

- **A BBPS hígítása:** Nem szükséges, előre hígított formátum.
- **Inkubációs idő:** 10 perc, szobahőmérsékleten.
- Távolítsa el a felesleges reagenst, itassa körbe a metszetet
- Mosás nélkül folytassa a műveletet az elsődleges antitesttel való inkubációval.


HISTOLS®-BBPS (Background Blocking Protein Solution)

Háttér gátló fehérje oldat

Katalógus # 30012

TÁROLÁS ÉS STABILITÁS

Tárolja 2-8 °C között. Nem használható a termékcímkén feltüntetett lejárati időn túl. Ha a termék nem az előírásoknak megfelelően tárolt, alkalmazhatóságát a felhasználónak kell meghatározni.

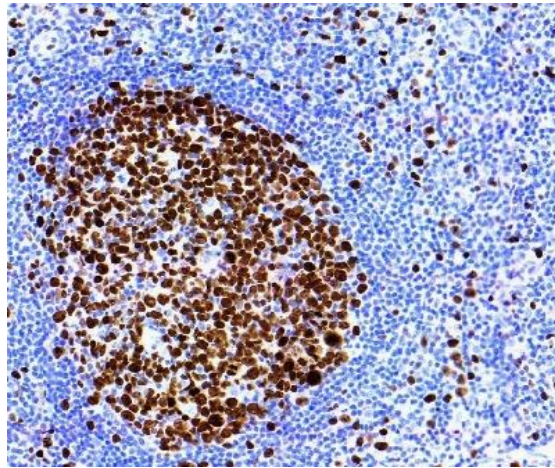

Ki-67, tonsilla,
HISTOLS®-BBPS háttérgátlót használva

	Lásd a mellékelt dokumentumon		Tárolási hőmérséklet		Minőségét megőrzi	REF	Termékkód	CE	Európai minősítés
	Lásd a mellékelt útmutatót		Hőtől és fénytől védve tárolandó	IVD	In vitro diagnosztikai alkalmazásra	LOT	Lot szám		Gyártó
	Veszély		Veszély		Veszély		Veszély		