

CRYO SPRAY



In vitro diagnosztikus orvostechnikai eszköz



Spray kiszerezésű oldat szövettani minták hűtésére

BIOGNOST®

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Katalógus szám: 08-SPRAY-2

Bevezetés

A Cryo Spray a kriosztátos szövettani minták gyors fagyasztására, illetve paraffinba ágyazott minták metszés előtti hűtésére alkalmas, amennyiben nem áll rendelkezésre blokkhűtő lap.

Termék leírása

- CRYO SPRAY – oldat szövettani minták hűtésére, fagyasztására.

A minta elkészítése és diagnosztikája

A minta levételéhez és kezeléséhez csak erre alkalmas eszközöket használjon. A minták modern technológiával feldolgozandók és megbízhatóan jelölendők. Mindig kövesse a gyártó által biztosított használati útmutatót. A hibák elkerülése céljából a festési eljárásokat és a diagnosztikát mindig erre megfelelően képzett és felhatalmazott személy végezze. Az elemzést orvosi diagnosztikai laboratóriumi követelményeknek eleget tevő mikroszkóppal végezze. A helytelen végeredmény elkerülése érdekében mindig végezzen pozitív és negatív kontrollt használat előtt.

Munka- és környezetvédelem

A terméket a munkavédelmi és környezetvédelmi irányelveknek megfelelően használja. A használt vagy lejárt szavatossági idejű oldatokat a nemzeti ajánlásoknak megfelelően veszélyes anyagnak kell kezelni és megsemmisíteni. Az ehhez a festési eljáráshoz alkalmazott reagensek veszélyesek lehetnek az emberi egészségre. A folyamat során vizsgált minták fertőzésveszélyt jelenthetnek. Az emberi egészség megóvása érdekében a jó laboratóriumi gyakorlatnak megfelelő ajánlott védő intézkedések betartása javasolt. A termékek a rajtuk található figyelmeztető jelzéseknek, valamint a BioGnost termékbiztonsági adatlapjaiban leírtaknak megfelelően kezelendők.

Tárolás, stabilitás és lejárati idő

A Cryo Spray oldat szorosan lezárt eredeti csomagolásában +15°C és +30°C között tárolandó, és a lejárati időn belül elhasználandó. A gyártás és a lejárati dátuma a termékcímkén található.

Referenciák

- Carson, F. L. (2007), Histotechnology, 2nd ed. Singapore
- Kiernan, J. A. (2008) Histological and histochemical methods, 4th ed. Bloxham: Scion Publishing Ltd.

08-SPRAY-2, V4-EN4, 05.07.2019., VR/IŠPR

	Lásd a mellékelt dokumentumon		Tárolási hőmérséklet		Tesztek száma csomagolásonként		Termékkód		Európai minősítés
	Lásd a mellékelt útmutatót		Hőtől és fénytől védve tárolandó		Minőségét megőrzi		Lot szám		Gyártó
	In vitro diagnosztikai alkalmazásra		Száraz helyen tárolandó		Vigyázat, törékeny				



BIOGNOST Ltd.
Medjugorska 59
10040 Zagreb
CROATIA
www.biognost.com

