

MICRO CLEAN



In vitro diagnosztikus orvostechnikai eszköz



BIOGNOST®

Spray kiszerezésű oldat felületek és eszközök effektív paraffinmentesítéséhez

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Katalógus szám: MC-OT-100

Bevezetés

A szövettani laboratóriumok rutin működése során mindennapos jelenség a paraffin szennyeződés felhalmozódása a munkafelületeken, eszközökön, különösen a beágyazó gépeken, amelyek folyékony paraffinnal működnek, illetve a mikrotomokon, amelyeken a paraffinos blokkokat metszik. A laboratórium tisztán tartása és a felületek paraffinmentesítése azonban fontos. Az olyan oldószerek, mint a xilol, toluol gyakran használatosak erre acélra, ezek viszont egészségre extrém módon káros anyagok. Ezekkel az oldószerekkel szemben hatásos alternatíva a BioGnost Micro Clean, amely nem káros az egészségre és a környezetre. spray kiszerezésben csomagolt, amely lehetővé teszi egyszerű és precíz felhasználását.

Termék leírása

- MICRO CLEAN** – Spray kiszerezésű oldat felületek és eszközök effektív paraffinmentesítéséhez.

Ajánlott felhasználás:

1.	Vigye fel a Micro Clean oldatot a tisztítandó, paraffinnal szennyezett munkafelületre, eszközre	
2.	Hagyja a Micro Clean oldatot hatni	1 – 30 perc
	Megjegyzés: A hatóidő függ a felület paraffinnal szennyezettségének mértékétől. Amennyiben enyhén szennyezett, pár perc elegendő, amennyiben nagy mennyiségű paraffin halmozódott fel a felületen, hagyja hatni 30 percig	
3.	Távolítsa el a feloldódott paraffint papír törővel, pamut vagy cellulóz vattával.	

A minta előkészítése és diagnosztika

A minta levételéhez és előkészítéséhez csak erre alkalmas eszközt használjon. A minták feldolgozása korszerű körülmények között és világos megjelöléssel végezhető. Mindig kövesse a gyártó használati útmutatóját. A hibák elkerülése érdekében a festési eljárást és annak kiértékelését arra jogosult és képzett szakszemélyzet végezze el. Kiértékeléshez az orvosi diagnosztikai laboratóriumok követelményrendszerének megfelelő mikroszkópot használjon. A hibás eredmény elkerülése érdekében mindig végezzen pozitív és negatív kontroll vizsgálatot egyaránt.

Munka- és környezetvédelem

A terméket a munkavédelmi és környezetvédelmi irányelveknek megfelelően használja. A használt vagy lejárt szavatossági idejű oldatokat a nemzeti ajánlásoknak megfelelően veszélyes anyagként kell kezelni és megsemmisíteni. Az ehhez a festési eljárásához alkalmazott reagensok veszélyesek lehetnek az emberi egészségre. A folyamat során vizsgált minták fertőzésveszélyt jelenthetnek. Az emberi egészség megóvása érdekében a jó laboratóriumi gyakorlatnak megfelelő ajánlott védő intézkedések betartása javasolt. A termékek a rajtuk található figyelmeztető jelzéseknek, valamint a BioGnost termékbiztonsági adatlapjaiban leírtaknak megfelelően kezelendők.

Tárolás, stabilitás és lejárati idő

Az Micro Clean szorosan lezárt eredeti csomagolásában +15°C és +25°C között tárolandó. A reagens száraz helyen tartandó, nem fagyasztható és ne tegyük ki direkt napfénynek. A gyártás és a lejárati dátuma a termék címkén található.

Referenciák

- Carson, F. L., Hladik, C. (2009): Histotechnology: A Self-Instructional Text, 3rd ed., Chicago: ASCP Press.
- Kiernan, J.A. (2008): Histological and histochemical methods: Theory and Practice, 4th ed., Bloxham, Scion Publishing Ltd.
- Callis, G., Sterchi, D. (1998): Decalcification of bone: literature review and practical study of various decalcifying agents, methods and their effects on bone histology. J. Histotechnol. 21:49-58.

MC-OT-100, V2-EN2, 5 July 2019, AK/IŠP

	Lásd a mellékelt dokumentumon		Tárolási hőmérséklet		Tesztek száma csomagolásonként	REF	Termékkód		Európai minősítés
	Lásd a mellékelt útmutatót		Hőtől és fénytől védve tárolandó		Minőségét megőrzi	LOT	Lot szám		Gyártó
IVD	In vitro diagnosztikai alkalmazásra		Száraz helyen tárolandó		Vigyázat, törékeny				



BIOGNOST Ltd.
Medjugorska 59
10040 Zagreb
CROATIA
www.biognost.com

